

NEU:

derma Litecheck® UV Multimedia

jetzt auch als Geräteversion mit integrierter USB-Kamera erhältlich

EUR 442,00

inklusive Versandkosten, zzgl. gesetzl. MwSt

- **Aufnahme und Wiedergabe z.B. unter Windows 10 (Kamera und Media Player)**
- **Videobearbeitung möglich (Schnitt etc.) mit üblichen Windows-Programmen**

Multimedia-Geräteversion mit integrierter USB-Kamera, incl. Anschlussleitung CMOS, 3,14 Megapixel 80° V5 Fixfokus, US 2.0

Inbetriebnahme:

- Netzstecker wie gewohnt in die seitlich am Gerät befindliche dreipolige Buchse stecken und das Gerät einschalten.
- Schutzkappe vom Kamera-Auge abziehen. Dieses befindet sich integriert in der Schutzscheibe unter der Elektronik
- USB-Kabel in die dafür vorgesehene Buchse an der Rückseite des Gerätes stecken.
- USB-Kabel an den Rechner anschließen
- Tonzeichen/Meldung: USB-Kamera wurde erkannt und erfolgreich eingerichtet
- Beispiel Windows 10: Hier das Programm „Kamera“ öffnen



NEU:

derma Litecheck® UV Multimedia

jetzt auch als Geräteversion mit integrierter USB-Kamera erhältlich

Live und in Farbe

Die clevere Schreibtisch-Lösung von Dermalux® mit USB-Kamera

Beispiele für Einsatzbereiche:

Wissenschaftliche Studien
Vortragsgestaltung
Bild-und Filmdokumentationen
Live-Schaltungen über Skype
Präsentationen über Laptop und Beamer oder TV-Bildschirm
Großprojektionen

Messeauftritte
Kongresse
Gruppentrainings
Nachweiszwecke
Herstellung bzw. Bearbeitung von Unterrichtsmaterial
Kundenpräsentationen

Filmaufnahmen
Fotoaufnahmen
Datenarchivierung
Langzeit-Studien

und vieles mehr

